


## Kurzanleitung MEDsan® SARS-CoV-2 Ag Duo

### A Vorbereitung:


Öffne nun den versiegelten Folienbeutel und lege den Teststreifen vor Dir auf den Tisch. Bitte beschriften mit einem wasserfesten Stift.

### B Testdurchführung:

1. Nimm die Maske ab und spüle den Mund mit einem Schluck sauberem Wasser aus (Wasser ausspucken oder herunterschlucken). Achte dabei auf ausreichenden Abstand zu anderen Personen.
2. Sammle Sekret durch "Hochziehen" oder "Schleim abhusten" im Mund und sammle auf deiner Zunge.
3. Nimm nun den Probentupfer und lege diesen in den angesammelten Speichel auf deiner Zunge.  
Bitte achte darauf, dass der Tupfer keine andere Region oder Gegenstände außerhalb des Mundes berührt. Ansonsten muss das Stäbchen verworfen werden.
4. Nun drehe den Tupfer im Speichel für **10-15 Sekunden** um eine Probe aufzunehmen.
5. Stecke anschließend die Spitze des Tupfers in das beiliegende Röhrchen mit der Pufferlösung und drehe es mehrmals. Auch hier darf der Tupfer keine weiteren Gegenstände berühren.
6. Nun das Teststäbchen an der dafür vorgesehene Markierung abbrechen und den unteren Teil im Röhrchen lassen. Verschließe das Röhrchen. Bitte setze anschließend die Maske wieder auf.
7. Das Röhrchen mit dem Tupfer wird nun **mind. 1 min** lang stehen gelassen oder senkrecht in der Hand gehalten.

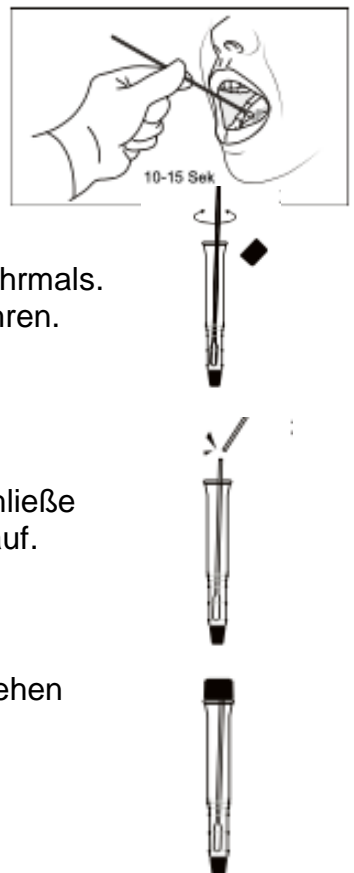

8. Entferne nun den unteren Deckel des Probenröhrchens und gebe **2 Tropfen** der Lösung auf die dafür vorgesehene runde Vertiefung auf dem Teststreifen.

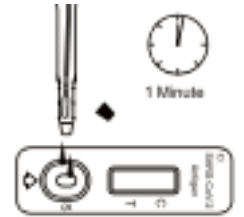

9. Jetzt stellst du eine Uhr auf **15min** und wartest. Nach Ablauf der Zeit wird das Ergebnis sofort abgelesen und dokumentiert. Danach entsorgst du den Test im Mülleimer.

### C Ergebnis-Auswertung:

Auf dem Teststreifen finden Sie zwei Buchstaben T (Test-Bande) und C (Kontroll-Bande). Zu beachten ist:

- Für einen gültigen Test muss immer eine deutlich sichtbare Bande neben dem Buchstaben C sichtbar sein (Kontrolle, Test korrekt durchgeführt)
- *20 min nach Teststart ist das Ergebnis nicht mehr gültig*

<b>Positiv +</b>	<b>Negativ -</b>	<b>Ungültig X</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sowohl bei T und bei C ist eine rötliche Bande sichtbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rötliche Bande bei C sichtbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine Bande ist sichtbar</li> <li>- Nur eine Bande bei T sichtbar</li> </ul>
